

陕西省临床检验中心

2019 年全省血型鉴定室间质量评价活动指导书

一、评价项目

全年血型鉴定室间质评活动共进行两次，每次五个质评样本。评价项目：红细胞 ABO、Rh (D) 分型（正定型）、ABO 分型检测（反定型）。

二、时间安排

活动次数	批号	建议检测日期	回报截止日期	成绩回报日期 (实验室自行打印)
第一次	201911、201912	收到即刻检测	4 月 25 日	5 月 10 日
	201913、201914			
	201915			
第二次	201921、201922	9 月 17-18 日	9 月 26 日	10 月 15 日
	201923、201924			
	201925			

注：1. 质评结果网报，不接收纸质回报；2. 参评实验室在质评成绩回报日期后，登陆检验医学信息网（www.clinet.com.cn），在“室间质评目录下的质评成绩回报子目录”下，打印质评报告。

三、样本使用方法

1. 第一次做 ABO、Rh(D) 血型检测（正定型），因红细胞分型质评样本有效期短，所以各实验室收到样本后及时检测，将其应置 2-8℃ 储存；第二次只做 ABO 血型检测（反定型），收到抗体血浆样本后，将其置-20℃ 冻存。在规定时间内进行检测。

2. 检测方法按各实验室所使用的方法要求操作，与患者样本同条件下检测。

3. 结果上报：ABO 血型请报鉴定结果“A”、“B”、“O”或“AB”；Rh(D) 血型抗体，请报“+”或“-”。检测方法、仪器、试剂厂家分别按各自编码填写（编码见附页）。如果编码表中未包含你室所使用的检测系统，请与我们联系，我们将及时添加。

四、注意事项

1. 全年质评样本分两次发放（3 月底和 8 月底），由冷链公司全程冷链运输发送。请参评实验室接收人员按照《质评样本签收确认表》的内容，仔细核对样本的包装、数量、批号，并在确认表上签字。同时，对冷链运输服务进行满意度评价。

2. 质评样本发放时，临检中心会及时以微信或短信方式提醒参评实验室注意查收。若有问题，及时与临检中心联系。**活动指导书（光盘）只发一次，供全年使用，请各实验室妥善保存。另外，我们还会把《活动指导书》上传到临检中心网站，可直接在下载专区下载。**

3.为了保证质评结果的正确传输和及时有效，请实验室网络上报质评结果。报方法请参考“2019 年全省检验医学室间质量评价计划”中的“参评实验室在线 EQA 程序操作说明”。第一次网上回报截至日期为 2019 年 4 月 25 日，第二次网上回报截至日期为 2019 年 9 月 26 日，至此网络上报将自动关闭。

地 址：西安市友谊西路 256 号 陕西省人民医院内 陕西省临床检验中心
邮 编：710068

联系人：赵院利 联系电话：（029）85253261-2571、3571、18092399009

传 真：（029）88663725 临检中心微信号：18092399009

电子邮箱：sxseqa@126.com 邮箱密码：257100

网 址：<http://sxccl.clinet.cn/>

2019 年 2 月 28 日

2019 年全省血型鉴定方法、试剂及仪器编码表

项 目	编 码	方法名称
ABO、Rh (D)	1800	卡片凝集法
	1801	玻片凝集法
	1802	试管法
	1803	卡式法
	1804	全自动微板法
	1805	凝胶微柱法
	1899	其它（请详述）
	编 码	试剂名称
	18000	上海血液
	18001	河北医科大学
	18002	美国强生
	18003	瑞士达亚美
	18004	江阴力博
	18005	长春博研
	18006	Millipore
	18999	其它（请详述）
	编 码	仪器名称
	180000	Anthos(奥地利)系列酶标仪
	180100	Sunrise 系列酶标仪
	180200	伯乐 450
	180210	伯乐 550
	180220	伯乐 Coda
	180230	伯乐 680
	180300	雅培系列免疫分析仪
	180400	宝灵曼系列免疫分析仪
	180500	BEP III 系列酶标后处理系统
	180600	上海科华系列酶标仪
	180700	人眼判读
	189999	其它（请详述）

陕西省临床检验中心

2019 年全省血型鉴定室间质量评价结果回报表

2019 年第 1 次 总 21 次

单位名称: _____ 实验室代码: _____

通讯地址: _____ 邮 编: _____

单位等级: _____ 联 系 电 话: _____

检测日期: _____ 年 月 日 回报日期: _____ 年 月 日

批号	检测结果		方法	仪器	试剂
	ABO 血型	Rh (D) 血型			
201911					
201912					
201913					
201914					
201915					

检测者签字:

审核者签字:

注: 1.血型质评样本有效期短, 请收到后立即检测。

2.血型鉴定为正定型时, 需做 ABO 和 Rh (D) 两个血型系统的鉴定; 血型鉴定为反定型时, 仅做 ABO 血型系统的鉴定。

3.检测系统每年需更新, 网络上报结果时, 系统将默认上次检测系统编码, 请上报结果时务必点开重新选择。如果你室检测系统不在列表内, 请及时联系我们。

陕西省临床检验中心

2019 年全省血型鉴定室间质量评价结果回报表

2019 年第 2 次 总 22 次

单位名称：_____ 实验室代码：_____

通讯地址：_____ 邮 编：_____

单位等级：_____ 联 系 电 话：_____

检测日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 回报日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

批号	检测结果	方法	仪器	试剂
	ABO 血型			
201921				
201922				
201923				
201924				
201925				

检测者签字：_____

审核者签字：_____

注：1.血型质评样本有效期短，请收到后立即检测。

2.血型鉴定为正定型时，需做 ABO 和 Rh（D）两个血型系统的鉴定；血型鉴定为反定型时，仅做 ABO 血型系统的鉴定。

3.检测系统每年需更新，网络上报结果时，系统将默认上次检测系统编码，请上报结果时务必点开重新选择。如果你室检测系统不在列表内，请及时联系我们。