

# 陕西省临床检验中心

## 2020 年全省糖化血红蛋白室间质评活动安排

### 一、质评项目

糖化血红蛋白室间质评活动全年一次，共五份质评样本（冻干粉），九月初发放；评价项目：糖化血红蛋白 HbA1c 定量评价项目 1 个；适用于酶免法、免疫比浊法、亲和色谱法、高效液相色谱法、离子交换色谱法、电泳法、微粒色谱法等。

### 二、时间安排

活动次数	批号	建议测定日期	收到结果截止日期	结果回报日期 (实验室自行打印)
全年一次	202001、202002			
	202003、202004	9月19-21日	9月25日	10月16日
	202005			

备注：1. 质评结果统一网报，不接收纸质回报；2. 参评实验室在质评成绩回报日期后，登陆检验医学信息网（[www.clinet.com.cn](http://www.clinet.com.cn)），在“室间质评目录中的质评成绩回报子目录”下，打印质评报告。

### 三、样本使用方法

实验室收到质评样本后保存于 2-8℃ 冰箱中。使用时每瓶质评样本用 0.5 毫升双蒸水或去离子水复溶，加盖后室温放置 15 分钟，使瓶内物质充分溶解后检测。质评样本与患者样本在同条件下检测。

### 四、注意事项

1. 糖化血红蛋白室间质评样本九月发放，收到样本后，应立即检查样本的批号、数量是否与活动安排相符，检查样本是否有渗漏，如有问题请及时与质评室联系，发放后会以微信或短信形式通知各参评单位。

2. 各实验室应按照规定的时间进行检测，测定方法、仪器、试剂编码请参照编码表填写，若不在编码范围内，请写出具体名称；检测系统每年需更新，网络上报结果时，系统将默认上次检测系统编码，请上报结果时务必点开重新选择。如果你室检测系统不在列表内，请及时联系我们，否则将可能影响你室成绩。

3. 应将测定后的质评样本与患者样本相同对待，按照具有潜在传染性的医疗废弃物处理。

4. 为了保证质评结果的正确传输和及时有效，请实验室网络上报质评结果。

网址是 [www.clinet.com.cn](http://www.clinet.com.cn)，用户名和初始密码均为实验室代码（以 2019 年质评成绩报告单上的实验室代码为准）。若实验室代码不清楚，请及时与我们联系。网报方法请参考“2020 年全省检验医学室间质量评价计划”中的“室间质评在线操作说明”。

5. 此活动说明，供全年使用，各实验室应妥善保存。

地 址：西安市友谊西路 256 号 陕西省人民医院内 陕西省临床检验中心

邮 编：710068

联系电话：（029）85253261 转 2571 或 3571 18092399009

传 真：（029）88663725

电子邮箱：[sxseqa@126.com](mailto:sxseqa@126.com)，密码 257100

网 址：<http://sxcl.clinet.cn/>

微 信 号：18092399009

**2020 年 3 月 20 日**

## 2020 年全省糖化血红蛋白

### 室间质评方法、仪器、试剂及校准物编码表（1）

方法学编码			
编 码	方法学名称	编 码	方法学名称
0900	高压液相色谱法	0908	离子交换层析法
0901	低压液相色谱法	0909	酶法
0902	微粒子色谱法	0910	免疫散射速率法
0903	离子交换色谱法	0911	离子交换树脂法
0904	免疫荧光层析法	0912	色谱分光光度法
0905	乳胶免疫比浊法	0913	微量色谱法
0906	乳胶凝集法	0999	其它（请详述）
0907	散射比浊法		
仪器编码			
编 码	名称及型号	编 码	名称及型号
090100	美国伯乐 D-10	091103	贝克曼 AU680
090200	日立 7100	091104	贝克曼 DXC800
090201	日立 7600	091105	奥林巴斯 AU640
090202	日立 7180	091106	奥林巴斯 AU680
090203	日立 7080	091107	奥林巴斯 AU400
090300	希森美康 HLC-723G8	091200	迈瑞 BS800
090301	希森美康 JCA-BM6010/c	091201	迈瑞 BS390
090400	江苏奥迪康 AC 系列	091202	迈瑞 BS2000
090500	广州万孚 FS-112	091203	迈瑞 BS380
090501	广州万孚飞测	091204	迈瑞 BS420
090600	罗氏 C501	091205	迈瑞 BS400
090601	罗氏 800	091300	东芝 TBA-40FR
090602	罗氏 6000	091301	东芝 TBA-120FR
090700	上海华臣 MQ2000/MQ2000PT	091400	东曹 H2-HLC-G8
090800	挪威小旋风（Axis-shield Nycocard Reader II）	091401	东曹 AIA2000
090900	美艾利尔 As100	091500	上海康祥 MQ2000PT
091000	爱来科 HA8180	091600	深圳普门 GH-900
091100	贝克曼 DXC600	091700	石家庄禾柏生物 HP083
091101	贝克曼 AU2700	091800	普莱默斯 Hb9210
091102	贝克曼 AU480	091900	深圳国赛

## 2020 年全省糖化血红蛋白

### 室间质评方法、仪器、试剂及校准物编码表（2）

仪器编码			
编 码	名称及型号	编 码	名称及型号
092000	西班牙 Biosystems	092500	日本京都第一科学 HA8160
092100	宁波美康 MS-880	092600	陕西高歌电子科技
092200	优尼德 UNT5000	092700	深圳雷诺华
092300	挪威 NycoCard Reader II	099999	其它（请详述）
092400	深圳锦瑞 PA54		
试剂、校准物编码及名称			
编 码	名 称	编 码	名 称
09000	江苏奥迪康	09019	深圳锦瑞
09001	美国伯乐	09020	深圳国赛
09002	上海华臣	09021	上海执诚
09003	北京九强	09022	西班牙 Biosystems
09004	罗氏	09023	上海科华
09005	广州万孚	09024	烟台奥斯邦
09006	宁波美康	09025	广州科方
09007	日本东曹	09026	重庆中元
09008	利德曼	09027	四川新健康成
09009	浙江伊利康	09028	武汉长立
09010	重庆中元	09029	上海东瓯
09011	贝克曼	09030	广东优尼德
09012	北京瑞正善达	09031	安徽伊普诺康
09013	深圳迈瑞	09032	厦门英科新创
09014	上海康祥	09033	石家庄禾柏生物
09015	上海惠中	09034	石家庄普莱默斯
09016	深圳普门	09035	长春迪瑞
09017	希森美康	09036	南京威特曼
09018	日本京都第一科学	09999	其它（请详述）

**陕西省临床检验中心**  
**2020 年糖化血红蛋白室间质评结果回报表**

总 7 次    2020 年 1 次

单位名称：\_\_\_\_\_ 实验室代码：\_\_\_\_\_ 单位等级：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

测定日期：        年        月        日        回报日期：        年        月        日

项 目		测 定 结 果						方 法	仪 器	试 剂	校 准 物
名 称	浓 度 单 位	精 度	202001	202002	202003	202004	202005				
HbA1c	%	0.0									

测定者签字：\_\_\_\_\_

审核者签字：\_\_\_\_\_

**二、注意事项**

1. 精度是指检测结果报告的位数，0 指检测结果只报告整数；0.0 指检测结果只报告到小数点后一位数字；0.00 指检测结果报告到小数点后两位数字。

2. 方法、仪器、试剂编码根据编码表编码选择，如编码表上无，**请与我们联系，以免影响您本次质评成绩。**