

陕西省临床检验中心

2020 年新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动安排

一、活动概况

1. 新型冠状病毒核酸检测室间质量评价活动是 2020 年新增的室间质量评价项目。质评样本 5 支，全程冷链运输发送给参评实验室。各实验室收到样本后-15℃以下冷冻保存。

2. 质评项目：2019-nCoV RNA 定性。

二、时间安排

批号	建议测定日期	结果回报截止日期	成绩回报日期 (实验室自行打印)
202011、202012			
202013、202014 202015	收到后尽快检测	10 月 10 日	10 月 20 日

备注：参评实验室在质评成绩回报日期后，登陆检验医学信息网（www.clinet.com.cn），在“室间质评目录中的质评成绩回报子目录”下，打印质评报告。

三、样本使用方法

1. 实验室收到质评样本后，应-15℃以下冷冻保存，避免反复冻融；使用时，从冰箱取出，室温（20~25℃）平衡 15 分钟后，震荡混匀，6000 转/分钟瞬时离心后，与患者样本在相同条件下进行检测。

2. 各实验室需准确填写检测系统信息（方法、仪器、试剂）编码。若检测系统信息不在编码范围内，请填写具体名称，以便今后列入编码范围内。

四、注意事项

1. 质评样本由冷链公司全程冷链运输发送。请参评实验室接收人员按照《质评样本签收确认表》的内容，仔细核对样本的包装、数量、批号，并在确认表上签字。

2. 质评样本发放时，临检中心会及时以微信或 QQ 提醒参评实验室注意查收。若有问题，及时与临检中心联系。

3. 为了保证质评结果的正确传输和及时有效，请实验室网络上报质评结果。网报方法请参考“2020 年全省检验医学室间质量评价计划”中的“参评实验室在线 EQA 程序操作说明”，用户名和初始密码均为实验室编码（以 2020 年第一

次质评成绩报告单上的实验室编码为准)。若实验室编码不清楚,请及时与室间质评室联系。

4. 所发质评样本为新型冠状病毒假病毒,应按有潜在生物传染性样本对待。

五、特别说明

1. 根据陕西省卫生健康委员会办公室发的《关于参加 2020 年全省新冠病毒核酸检测省级室间质评活动的通知》要求,各实验室检测新冠病毒室间质评样本时,需联系市级卫生健康行政部门派人现场监督,并在检测完成后立即在线填报结果。

2. 参加实验室需要登录检验医学信息网(www.clinet.com.cn)上报质评结果;还需要登录 <https://www.wjx.cn/jq/90412825.aspx>,上传样本的扩增曲线图和结果回报表。

3. 以下情形不发质评报告:① 只填 2019-nCoV RNA (定性)结果,无具体扩增基因的检测结果;② 不上传样本的扩增曲线图;③ 结果回报表不上传或签字不全。



扩增曲线上传二维码

地 址: 西安市友谊西路 256 号 陕西省人民医院内 陕西省临床检验中心

邮 编: 710068

联 系 人: 谢小娟

联系电话: (029) 85253261 转 2571 或 3571 18092399009

网 址: <http://sxcl.clinet.cn/>

微 信 号: 18092399009

2020 年 9 月 15 日

新型冠状病毒核酸检测室间质量评价

方法、试剂、仪器编码

编码	方法	编码	方法
4301	荧光 RT-PCR 法	4305	数字 PCR 法
4302	恒温扩增法	4306	高通量测序法
4303	杂交捕获免疫荧光法	4399	其它（请详细注明）
4304	RNA 捕获探针法		
编码	提取/扩增试剂	编码	提取/扩增试剂
43001	上海之江	43014	上海仁度
43002	上海捷诺	43015	西安天隆
43003	华大生物	43016	重庆中元
43004	中山达安	43017	上海思路迪
43005	湖南圣湘	43018	江苏硕世
43006	上海伯杰	43019	杭州博日
43007	成都博奥晶芯	43020	潮州凯普
43008	北京卓诚惠生	43021	济凡生物
43009	四川迈克生物	43022	杭州迪安
43010	武汉明德	43023	北京天根
43011	杭州优思达	43024	长春志昂
43012	厦门安邦	43999	其它（请详细注明）
43013	上海复星		
编码	仪器	编码	仪器
430101	中山达安 DA7600	430701	西安天隆 TL-988
430201	美国 ABI-7500	430702	西安天隆 Gentier 48E
430202	美国 ABI-7300	430703	西安天隆 Gentier 96E
430203	美国 ABI-7700	430801	杭州安杰思 AFD9600
430204	美国 ABI-7300 plus	430802	杭州安杰思 AFD4800
430205	美国 ABI-Q5	430901	上海枫岭 FIC2000
430301	罗氏 LightCycler 1.5	431001	德国凯杰 Rotor-Gene Q
430302	罗氏 LightCycler 480	431101	杭州博日 FQD-96A
430303	罗氏 z480	431201	杭州安誉 AGS 4800
430401	美国伯乐 CFX-96	431301	杭州迪安 MC-1000
430501	美国安捷伦 Mx3000P	431401	杭州晶格 X960
430502	美国安捷伦 Mx3005P	431501	北京乐普 Lepgen-96
430601	上海宏石 SLAN-48P	431601	苏州雅睿 MA-6000
430602	上海宏石 SLAN-96S	431701	福州泰普 TIB-8600
430603	上海宏石 SLAN-96P	439999	其它（请详细注明）
430604	上海宏石 SLAN-96R		

陕西省临床检验中心

2020 年全省新型冠状病毒核酸检测室间质评结果回报表

2020 年第 1 次 总第 1 次

单位名称：_____ 实验室编码：_____

通讯地址：_____ 联系电话：_____

测定日期：_____ 回报日期：_____

项目	测定结果				
	202011	202012	202013	202014	202015
2019-nCoV RNA (定性)					
内标 (CT 值)					
ORF1ab 区 (定性)					
ORF1ab 区 (CT 值)					
N 区 (定性)					
N 区 (CT 值)					
E 区 (定性)					
E 区 (CT 值)					
检测方法					
检测仪器					
检测试剂	提取试剂：		扩增试剂：		

注：1. 请如实填写目的基因检测结果；若不检测相关基因，则不填； 2. 检测项目的 CT 值若无，则填“0”； 3. 完整填写检测方法、仪器、试剂信息； 4. 以下情形不发质评报告：只填 2019-nCoV RNA (定性) 结果；不上传样本的扩增曲线图；结果回报表不上传或签字不全。

操作者签字：_____ 科主任签字：_____ 监督人员签字：_____

签字日期：_____