

陕西省临床检验中心

2022 年全省血型鉴定室间质量评价活动指导书

一、活动概况

1. 血型鉴定室间质评活动全年共开展两次，每次 10 支质评样本，其中红细胞质评样本 5 支，血浆质评样本 5 支。

2. 评价项目：ABO 血型鉴定（正定型）、Rh（D）血型鉴定、ABO 血型鉴定（反定型）。

二、时间安排

活动次数	批号	建议测定日期	结果回报截止日期	成绩回报日期 (实验室自行打印)
第一次	202211、202212 202213、202214 202215	收到立即检测	5 月 5 日	5 月 16 日
第二次	202221、202222 202223、202224 202225	收到立即检测	9 月 23 日	10 月 14 日

注：1. 质评结果网报，不接收纸质回报；2. 参评实验室在质评成绩回报日期后，登陆检验医学信息网（www.clinet.com.cn），在“室间质评目录下的质评成绩回报子目录”下，打印质评报告。

三、样本使用方法

1. 质评样本收到后，红细胞分型质评样本有效期短，各实验室收到样本后应立即检测，如需储存，应将其置于 2-8℃ 储存；血浆样本请及时检测，如需储存，请置于 -20℃ 以下冻存。

2. 检测方法按各实验室所使用的方法要求操作，与患者样本同条件下检测。

3. 结果上报：ABO 血型请报鉴定结果“A”、“B”、“O”或“AB”；Rh(D) 血型抗体，请报“+”或“-”。检测方法、仪器、试剂厂家分别按各自编码填写（编码见附页）。如果编码表中未包含你室所使用的检测系统，请与我们联系，我们将及时添加。

四、注意事项

1. 质评样本分两次发放，上下半年各一次。**血型鉴定（正定型）质评样本有效期短，受疫情影响已过期，第一次 ABO 血型鉴定（正定型）和 Rh（D）血型鉴定不检测，只检测 ABO 血型鉴定（反定型）。**请参评实验室接收人员按照

《质评样本签收确认表》的内容，仔细核对样本的包装、数量、批号，并在确认表上签字。同时，对冷链运输服务进行满意度评价。

2. 质评样本发放时，临检中心会及时以微信或短信方式提醒参评实验室注意查收。若有问题，及时与临检中心负责人联系。

3. 为了保证质评结果的正确传输和及时有效，请实验室网络上报质评结果。报方法请参考“2022 年全省检验医学室间质量评价计划”中的“参评实验室在线 EQA 程序操作说明”。**第一次网上回报截至日期为 2022 年 5 月 5 日，第二次网上回报截至日期为 2022 年 9 月 23 日，至此网络上报将自动关闭。**

地 址：西安市友谊西路 256 号 陕西省人民医院内 陕西省临床检验中心

邮 编：710068

联 系 人：苏欣 联系电话：（029）85253261-2571、3571、18092399009

传 真：（029）88663725 临检中心微信号：18092399009

网 址：<http://sxccl.clinet.cn/>

2022 年 3 月 10 日

2022 年全省 AB0、Rh (D) 血型鉴定方法、试剂及仪器编码表

编 码	方 法	编 码	方 法
1800	微柱凝集法（手工加样）	1805	凝聚胺法
1801	破片凝集法	1806	酶法
1802	盐水试管法	1807	抗人球蛋白试管法
1803	微柱凝集法（自动加样）	1808	红细胞磁化法
1804	微孔板法	1899	其它（请详述）
编 码	试 剂	编 码	试 剂
18000	上海血液	18009	长春博讯
18001	河北医科大学	18010	北京金豪
18002	美国强生	18011	英科新创
18003	瑞士达亚美	18012	长春博德
18004	江阴力博	18013	深圳康乃格
18005	长春博研	18014	5%的 A、B 红细胞悬液
18006	Millipore	18015	自配试剂
18007	中山生科	18999	其它（请详述）
18008	天津德祥		
编 码	仪 器 名 称	编 码	仪 器 名 称
180000	Anthos(奥地利)系列酶标仪	180600	上海科华系列酶标仪
180100	Sunrise 系列酶标仪	180700	人眼判读
180200	伯乐 450	180800	AISEN170
180210	伯乐 550	180801	OCD 强生配血系统
180220	伯乐 Coda	180900	康乃格 ND-24K
180230	伯乐 680	181000	深圳爱康
180300	雅培系列免疫分析仪	181100	天津德祥 TD2-12 血型卡离心机
180400	宝灵曼系列免疫分析仪	181100	重庆奥特 BK-FL2
180500	BEP III 系列酶标后处理系统	189999	其它（请详述）

陕西省临床检验中心

2022 年全省血型鉴定室间质量评价结果回报表

2022 年第 1 次 总 27 次

单位名称: _____ 实验室代码: _____

通讯地址: _____ 邮 编: _____

单位等级: _____ 联 系 电 话: _____

检测日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 回报日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

批号	检测结果	方法	仪器	试剂
	ABO 血型 (反定型)			
202211				
202212				
202213				
202214				
202215				

检测者签字: _____

审核者签字: _____

注: 1.血型质评样本有效期短, 请收到后立即检测。

2.血型鉴定为正定型时, 需做 ABO 和 Rh (D) 两个血型系统的鉴定; 血型鉴定为反定型时, 仅做 ABO 血型系统的鉴定。

3.检测系统每年需更新, 网络上报结果时, 系统将默认上次检测系统编码, 请上报结果时务必点开重新选择。如果你室检测系统不在列表内, 请及时联系我们。

陕西省临床检验中心

2022 年全省血型鉴定室间质量评价结果回报表

2022 年第 2 次 总 28 次

单位名称：_____ 实验室代码：_____

通讯地址：_____ 邮 编：_____

单位等级：_____ 联 系 电 话：_____

检测日期：_____ 年 月 日 回报日期：_____ 年 月

日

批号	检测结果			方法	仪器	试剂
	ABO 血型 (正定型)	ABO 血型 (反定型)	Rh (D) 血型			
202221						
202222						
202223						
202224						
202225						

检测者签字：_____

审核者签字：_____

注：1.血型质评样本有效期短，请收到后立即检测。

2.血型鉴定为正定型时，需做 ABO 和 Rh (D) 两个血型系统的鉴定；血型鉴定为反定型时，仅做 ABO 血型系统的鉴定。

3.检测系统每年需更新，网络上报结果时，系统将默认上次检测系统编码，请上报结果时务必点开重新选择。如果你室检测系统不在列表内，请及时联系我们。